



TI INVITO A *sorridere*  
OFFRO IO!

## Endodontic Line Product

---

Sealing & Filling Canal / Accessories

# FILLROOT<sup>st</sup>

Sigillante bioceramico premiscelato  
Pasta flow a base di alluminosilicato di calcio




0000182 | FILL Root

Packaging: 1 siringa da 2 gr. + puntali      Prezzo: € 140,00

## Caratteristiche e benefici

- Sigillatura aderente
- Eccellente adesione alla gutta-percha e alla dentina
- Nessuna contrazione
- Generazione di idrossiapatite
- Idrofilo
- Particelle estremamente piccole

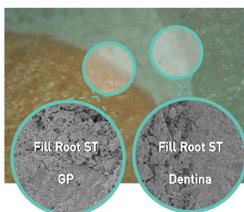

Nessuno spazio nell'interfaccia GP/FILL ROOT<sup>st</sup> e Dentina/FILL ROOT<sup>st</sup>.



Immagine al microscopio del test sulle microinfiltrazioni (test di penetrazione); nessuna infiltrazione rilevata.

## Facile da utilizzare


- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile
- Ottima fluidità

## Biocompatibile

- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo


## Alto Ph

Ph di 4 sigillanti canalari a confronto

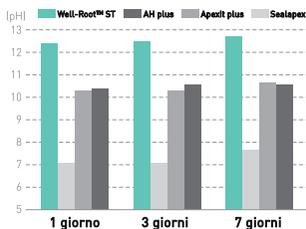

- Generazione di idrossido di calcio
- Valore del PH oltre 12
- L'ambiente alcalino lo rende altamente antibatterico

## Radiopacità

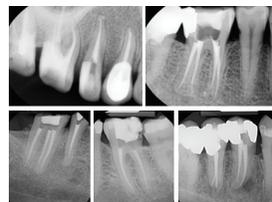

FILL ROOT<sup>st</sup> utilizza ossido di zirconio per agente radiopaco

# Well-Root™ PT

Putty bioceramico premiscelato  
Alluminosilicato di calcio



00340179 Well Root™ ST



Packaging: 10 capsule da 0,25 gr. Prezzo: € 220,00

## Caratteristiche e Benefici


- Putty premiscelato
- Riempito solo in pasta
- Tempo appropriato per le applicazioni (Nè troppo corto / Nè troppo lungo)
- Elevata resistenza alla compressione ( $\pm 100$  MPa)
- Effetti antibatterici da Ph alcalino
- Elementi biocompatibili
- Radiopaco

## Proprietà del Well-Root™ PT

Proprietà in conformità con ISO 6876:2012

Fluido (mm)		Spessore del film ( $\mu$ m)
9.3 $\pm$ 0.2		38.8 $\pm$ 4
Tempo di impostazione (min.)		Radiopacità (mmAl)
Iniziale	5 $\pm$ 2 min	5.4
Finale	45 $\pm$ 5 min	


## Biocompatibilità

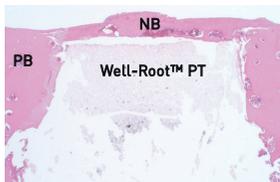

PB: Osso pre-esistente / NB: Nuovo osso

- Well-Root™ PT non crea un principio infiammatorio
- Well-Root™ PT favorisce la mineralizzazione
- Bioattivo

## Cambiamento del Ph nel Well-Root™ PT

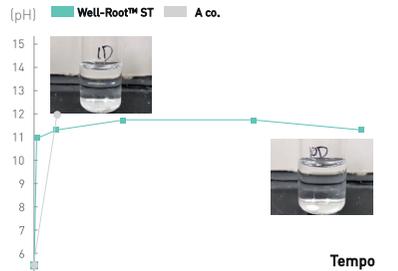

(Conservare in acqua distillata in un incubatore a 37°C)

Antibatterico per Ph Alcalino

# PRO Ring

Misuratore endodontico ad anello

Pro Ring misuratore canalare di precisione, metallico, con supporto ad anello per operatori destrorsi o sinestrosi, da utilizzare con strumenti dotati di stopper. Lunghezza 40mm. Colore blu.



Packaging: 1 pz.

Prezzo: € 29,00

144510116

Pro Ring

# Silicon Endo Daisy

Stopper in silicone

Silicon Endo Daisy sono degli anelli a forma di margherite in silicone per strumenti canalari. Per ogni ciclo in autoclave, viene eliminato un petalo in modo da poter monitorare l'utilizzo dello strumento.

Diametro 7mm. Colore giallo.



Packaging: 100 pz.

Prezzo: € 30,00

144510118

Silicon Endo Daisy

# Files Holder

Porta strumenti in plastica

Files Holder è un porta strumenti endodontici, in plastica autoclavabile, dotato di 8 fori su cui posizionare tutti gli strumenti rotanti, in base alla sequenza.

Dimensioni: Lunghezza 85mm x Altezza 35mm x Profondità 35mm.

Colore giallo.



Packaging: 1 pz.

Prezzo: € 25,00

144510115

Files Holder