



GREEN SOLVENT

Solvente pronto all'uso
Ready to use solvent





GREEN SOLVENT



Solvente pronto all'uso / Ready to use solvent

Descrizione / Description

Green Solvent è un solvente biodegradabile pronto all'uso indicato per la rimozione di cementi a base di ossido di zinco, materiali di impronta e sporco di varia natura da tutti gli strumenti e superfici in acciaio inox utilizzati in campo odontoiatrico. Ideale anche su alluminio e materiale plastico in generale.

Green Solvent is a ready-to-use biodegradable solvent indicated for the removal of zinc oxide based cements, impression materials and dirt of various kinds from all stainless steel instruments and surfaces used in dentistry. Also ideal on aluminum and plastic materials.

Modalità d'Impiego / Method of use

Con l'apposito erogatore imbibire con il prodotto un batuffolo di cotone e passarlo sulle superfici da trattare, lasciare agire per qualche minuto. Strofinare fino ad eliminazione completa dei cementi e dei materiali di impronta dalla superficie stessa.

Using the spray bottle dispenser, soak a cotton ball with the product and wipe it over the surfaces to be treated; leave for a few minutes. Rub until cements and imprint materials are completely removed from the surface.

Packaging

- Bottiglia: 200 ml

Bottle: 200 ml

- Cartone: 24 bottiglie

Box: 24 bottles


MICROPOMPA EROGATRICE
MICRO DISPENSING PUMP



PER USO PROFESSIONALE
FOR PROFESSIONAL USE



BUONI INDICI DI BIODEGRADABILITÀ
GOOD BIODEGRADABILITY INDEXES

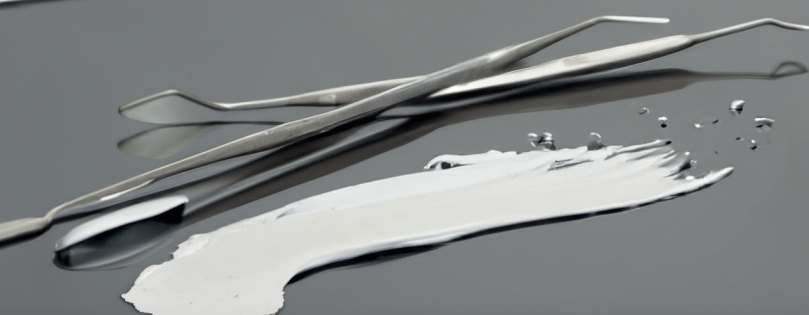

Distributed by:

 DENTAL WORLD S.r.l.

Tel. +39 080 3381004 / Fax. +39 080 3386617
www.dental-world.it / info@dental-world.it

Manufactured by:

 CERICHEM BIOPHARM S.r.l.

Tel. +39 088 5444490
www.cerichem.com