

Largo & Gates

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Largo & Gates sono frese in acciaio inox per canali radicolari.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per l'allargamento dei canali radicolari.

Misure

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Confezionamento

Blister da 6 pezzi (assortiti o singole misure)

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

Utilizzare in qualsiasi manipolo ad angolo retto per allargare la porzione coronale del canale per la rimozione massiva della struttura.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti

di luce diretta.

Precauzioni

- Gli strumenti sono consigliati monouso.
- Se utilizzati ripetutamente potrebbero non essere efficienti e/o causare danni/inconvenienti al paziente.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.

Simboli



Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'inabilità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Largo & Gates

Mechanical canal Instruments

Description

Largo & Gates are stainless steel burs for root canals.

Indications

For use only in a dental office or hospital setting by qualified personnel.

Application field

For the widening of root canals.

Measures

LARGO		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,7	144910015	144910022
n°2 - 0,9	144910016	144910023
n°3 - 1,1	144910017	144910024
n°4 - 1,3	144910018	144910025
n°5 - 1,5	144910019	144910026
n°6 - 1,7	144910020	144910027
Ass. n°1 - 6	144910021	144910028

GATES		
Ø (mm)	28 mm	32 mm
n°1 - 0,5	144910001	144910008
n°2 - 0,7	144910002	144910009
n°3 - 0,9	144910003	144910010
n°4 - 1,5	144910004	144910011
n°5 - 1,3	144910005	144910012
n°6 - 1,5	144910006	144910013
Ass. n°1 - 6	144910007	144910014

Packaging

Blister 6 pcs (assorted or individual sizes).

Recommended procedure

Operative protocol:

Use in any right-angle handpiece to widen the coronal portion of the canal for massive removal of structure.


Storage

Store the product at room temperature away from direct light.

Cautions

- Instruments are disposable.
- Repeated use may not be effective and/or cause damage/ inconvenience to the patient.
- Do not use the blister if opened or damaged.

Symbols

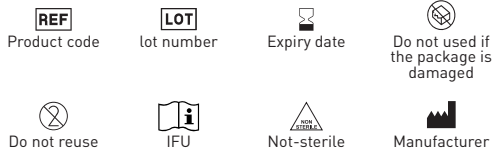

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it