

Paste carrier

Strumenti canalari meccanici

Descrizione

Paste Carrier (spingipasta) con molla è il lentulo ideale, realizzato in acciaio inox, per l'introduzione di cementi e medicinali all'interno dei canali.

Flessibilità e sicurezza sono garantite grazie alla breve molla posta tra la spirale e il gambo.

Indicazioni

Da utilizzare solo in studio odontoiatrico o in ambito ospedaliero da personale qualificato.

Campo di applicazione

Per il cateterismo e la definizione della forma.

Misure

PASTE CARRIER			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	144513505	144512100	144514010
● 30	144513515	144512110	144514020
● 35	144513525	144512120	144514030
● 40	144513535	144512130	144514040
06-15	144550915	144550925	144550935

Confezionamento

Blister da 4 pezzi (assortiti o singole misure)

Procedura raccomandata

Protocollo operativo:

Inserire nel canale lo strumento coperto di cemento e di seguito estrarlo lentamente con un movimento rotatorio.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente, lontano da fonti di luce diretta.

Precauzioni

- Gli strumenti sono consigliati monouso.
- Se utilizzati ripetutamente potrebbero non essere efficienti e/o causare danni/inconvenienti al paziente.
- Non utilizzare il blister se aperto o danneggiato.

Simboli



Codice prodotto



Numero lotto



Data di scadenza



Non utilizzare se la confezione è danneggiata



Non riutilizzare



Istruzioni d'uso



Non sterile



Fabbricante

Garanzia

Dental World sostituirà il prodotto che risulti essere difettoso.

Dental World non accetta la responsabilità per alcun danno o perdita, diretto o conseguente scaturito da uso incauto o l'incapacità ad usare il prodotto descritto. Prima di utilizzare, è responsabilità dell'utente determinare l'appropriatezza del prodotto per il suo uso. L'utente si assume la responsabilità per uso incauto.



Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it

Paste carrier

Mechanical root canal instruments

Description

Paste Carrier (paste pusher) with spring is the ideal lentulo, made of stainless steel, for introducing cements and medicaments inside canals.

Flexibility and safety are ensured by the short spring placed between the spiral and the shank.

Indications

For use only in a dental office or hospital setting by qualified personnel.

Application field

For catheterization and shape definition.

Size

PASTE CARRIER			
	21 mm	25 mm	29 mm
● 25	144513505	144512100	144514010
● 30	144513515	144512110	144514020
● 35	144513525	144512120	144514030
● 40	144513535	144512130	144514040
06-15	144550915	144550925	144550935

Packaging

Blister of 4 pieces (assorted or single sizes)

Recommended procedure

Operating protocol:

Insert the cement-covered instrument into the canal and then slowly pull it out in a rotary motion.


Storage

Store at room temperature, away from direct light sources.

Precautions

- The instruments are recommended for single use only.
- If used repeatedly they may be inefficient and/or cause harm/injury to the patient.
- Do not use the blister pack if opened or damaged.

Symbols

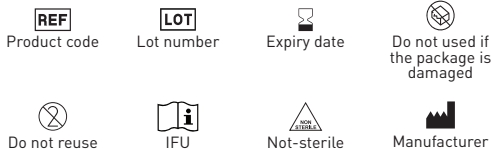

Warranty

Dental World will replace product that is proven to be defective. Dental World does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risks and liability in connection therewith.

 Dental World S.r.l.

Via Antichi Pastifici, 15 - 70056 Molfetta (BA)

Tel. +39 080 3381004 - Fax. +39 080 3386617

e-mail: info@dental-world.it / web: www.dental-world.it